



# BioSonic® WIPEOUT

Toalhetes desinfetantes premium

BioSonic WIPEOUT são toalhetes desinfetantes prontos a usar feitos de um substrato durável premium. Oferece formulações de ação rápida para qualquer superfície de dispositivos médicos não-invasivos, eficácia de largo espectro e aromas agradáveis. WIPEOUT Sensitive também tem detergente para uma limpeza ainda mais eficaz.



**O substrato não-tecido durável premium** garante um teor máximo de solução ativa e uma libertação eficaz sobre as superfícies tratadas.



BioSonic WIPEOUT



Toalhete comum



**Eficácia de largo espectro** – bactericida, tuberculocida, fungicida e virucida de espectro limitado, incluindo norovírus e adenovírus.



**Formulações de ação rápida**

15 s, 30 s, 60 s, 5 min



**Para cada superfície**, a solução certa.

WIPEOUT Sensitive para superfícies sensíveis. Fórmula para atenuar marcas de passagem, não deixa resíduos.

WIPEOUT Tex para todas as superfícies comuns.



**Aromas agradáveis**

Natural ou Limão



# BioSonic® WIPEOUT Sensitive

Toalhete premium sem álcool, ideal para superfícies sensíveis ao álcool

## Ativo em apenas 15 segundos

Rápida eficácia de largo espectro contra bactérias, leveduras e vírus

## Ativo contra norovírus

A sua poderosa formulação elimina vírus altamente resistentes, como os norovírus e os adenovírus

## Toalhete 2-em-1 com excelente poder de limpeza e desinfecção

Testado microbiologicamente em condições não higiénicas

## Fórmula para atenuar marcas de passagem

Ao contrário de outros produtos isentos de álcool – deixa resíduos mínimos depois da utilização

## Ideal para superfícies sensíveis ao álcool


Excelente compatibilidade do material com couro e vidro acrílico

## Substrato durável premium

O substrato não tecido durável premium garante um teor máximo de solução ativa e uma libertação eficaz sobre as superfícies a tratar

## Sem cheiro forte a químicos

Disponível num delicado aroma natural ou de limão

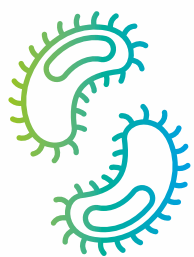

### Eficácia microbiológica

Bactericida	15 s
Leveduricida	15 s
Hep B, Hep C	15 s
VIH	30 s
Fungicida	5 min
Espectro virucida limitado	5 min

Normas dos testes: EN14885, EN13727, EN13624, EN14476, ASTM

**Ingredientes ativos** N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, propionato de N, N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amónio | **Tamanho do toalhete** 20 x 18 cm



# BioSonic® WIPEOUT Tex

Toalhete premium à base de álcool

## Elimina muitos agentes patogénicos em apenas 60 s

Incluindo vírus altamente resistentes, como os norovírus e os adenovírus

## Testado em condições não higiénicas

Bactérias, leveduras, fungos e vírus testados sob elevada carga orgânica

## Fungicida

BioSonic WIPEOUT Tex mata o *Aspergillus brasiliensis* em 5 min

## Proteção antimicrobiana alargada

A adição de desinfetante de biguanidina resulta numa proteção residual a longo prazo

## Tuberculocida

Atua rapidamente contra *mycobacterium terrae* e *avium*

## Substrato durável premium

O substrato não tecido durável premium garante um teor máximo de solução ativa e uma libertação eficaz sobre as superfícies a tratar.

## Suave aroma de álcool

A maior proporção de etanol em relação ao isopropanol permite um aroma mais agradável. Disponível num suave aroma de álcool ou de limão.



### Eficácia microbiológica

Bactericida	60 s
Leveduricida	60 s
Hep B, Hep C, VIH	60 s
Tuberculocida	60 s
Fungicida	5 min
Espectro virucida limitado	60 s

Normas dos testes: EN14885, EN14476, EN13624, EN13727, EN14348



**Ingredientes ativos** cloridrato de poli-hexametileno de biguanidina, etanol, isopropanol |

**Tamanho do toalhete** 20 x 18 cm




## Espectro de eficácia

	BioSonic WIPEOUT Sensitive	BioSonic WIPEOUT Tex
<b>Espectro virucida limitado</b>	5 min	60 s
<b>Vírus com envelope</b>		
Coronavírus	5 min	60 s
Hepatite B	15 s	60 s
Hepatite C	15 s	60 s
Vírus delta da hepatite	5 min	60 s
Herpes Simplex	5 min	60 s
VIH	30 s	60 s
Vírus Influenza (que inclui os vírus influenza humano, aviário e porcino)	5 min	60 s
Vírus da leucemia de células T humanas (HTLV)	5 min	60 s
Filovírus (inclui ébola)	5 min	60 s
Flavivírus	5 min	60 s
Vírus da rubéola	5 min	60 s
Vírus da raiva	5 min	60 s
Vírus do sarampo	5 min	60 s
Poxviridae	5 min	60 s
<b>Vírus sem envelope</b>		
Adenovírus*	5 min	60 s
Norovírus*	5 min	60 s
<b>Tuberculocida</b>	-	60 s
<b>Micobactericida</b>	-	60 s
Mycobacterium avium	-	60 s
Mycobacterium tuberculosis terrae	-	60 s
<b>Bactericida</b>	15 s	60 s
MRSA (estirpes multirresistentes de staphylococcus aureus)	15 s	60 s
Staphylococcus aureus	15 s	60 s
VRE	15 s	60 s
Escherichia coli	15 s	60 s
Pseudomonas aeruginosa	15 s	60 s
Enterococcus hirae	15 s	60 s
Salmonella typhimurium	15 s	60 s
<b>Leveduricida</b>	15 s	60 s
<b>Fungicida</b>	5 min	5 min
Candida albicans	15 s	60 s
Aspergillus brasiliensis	5 min	5 min

\* Em conformidade com a norma EN 14476 2013 "atividade virucida de espectro limitado"



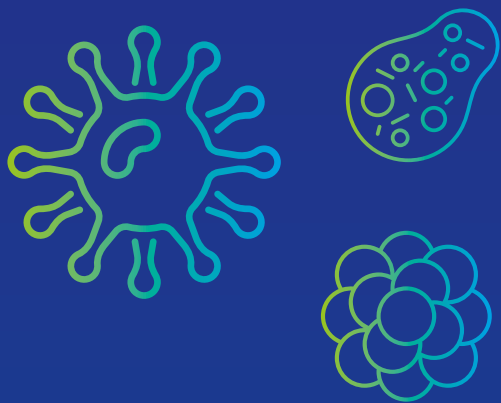

# Informação para encomendas

## BioSonic WIPEOUT

Recipiente dispensador e 6 recargas com 180 toalhetes de 20 x 18 cm cada uma

- 60021959 Sensitive, Limão
- 60021958 Sensitive, Natural
- 60021957 Tex, Limão (à base de álcool)
- 60021956 Tex, natural (à base de álcool)



## BioSonic® System

Desde 1988 que os sistemas de limpeza ultrassónica BioSonic da COLTENE têm merecido a confiança em todo o mundo, representando o padrão em ultrassons para a prática odontológica. Os produtos de limpeza BioSonic são concebidos a pensar no laboratório dentário e no exercício da odontologia, garantindo uma limpeza de elevada eficácia, embora suave, que previne danos nos instrumentos dentários e ortodónticos.

Para mais informações sobre os nossos produtos para o controlo de infeções e desinfetantes, consulte [www.coltene.com](http://www.coltene.com).



© COLTENE – [www.coltene.com](http://www.coltene.com)

**COLTENE Iberia S.L.U.**  
 c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A  
 28220 Majadahonda, Madrid/España  
 T +34 91 63 86 492  
 F +34 91 63 86 279  
[info.ib@coltene.com](mailto:info.ib@coltene.com)

**Coltène/Whaledent AG**  
 Feldwiesenstrasse 20  
 9450 Altstätten/Suíça  
 T +41 71 757 5300  
 F +41 71 757 5301  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**COLTENE**